



PANSEMENTS HÉMOSTATIQUES – pansements « israéliens »

Téléchargé sur <https://lavail.net>

© Dr Loïc LAVAILL



PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

A l'intérieur vers la plaie, appliquer le coussin absorbant sur la plaie.

A l'extérieur en regard de la plaie, dispositif




Appliquer le coussin absorbant directement contre la plaie

Tout en maintenant une pression contre la plaie, effectuer un seul tour de membre (ou du tronc) avec la bande élastique



Une fois le premier tour effectué, passer le reste de la bande enroulée dans le dispositif de serrage afin de changer le sens de rotation de la bande

Tirer sur la bande élastique pour mettre en tension le pansement compressif

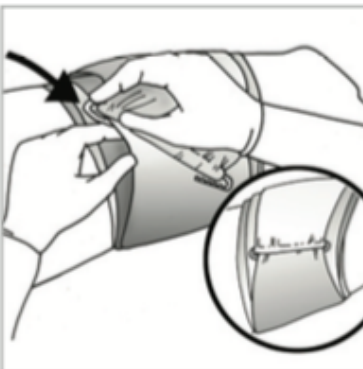

Terminer l'enroulage de la bande élastique autour du membre (ou du tronc) **dans le sens opposé au sens initial**, tout en maintenant la tension dans la bande

Agrafer la partie terminale de la bande élastique sur elle-même grâce à la pince terminale